



## TOMA DE MUESTRAS

### Hisopo nasofaríngeo

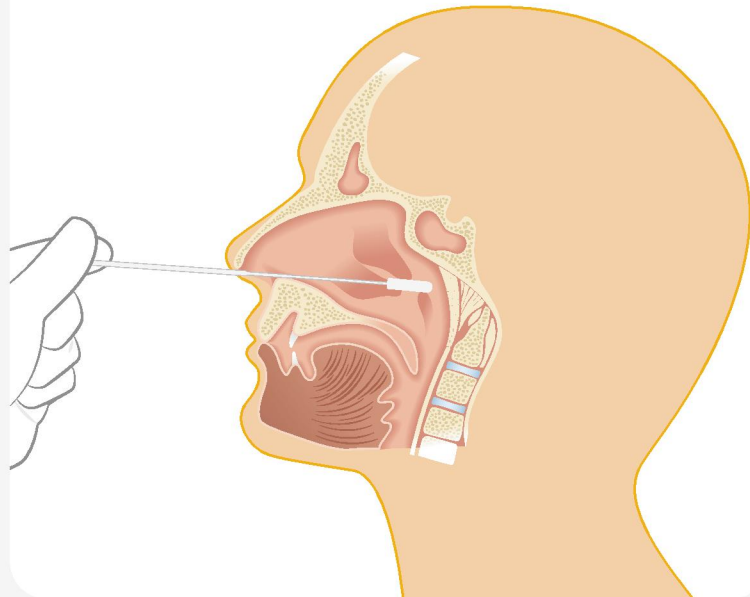


### Espujo


1 Enjuague su boca con agua

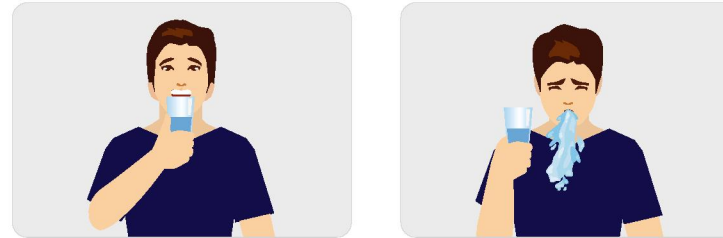

2 Inhala y exhala 3 veces

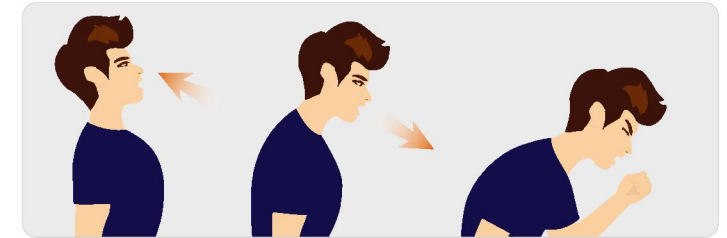

3 Escupir una muestra de esputo

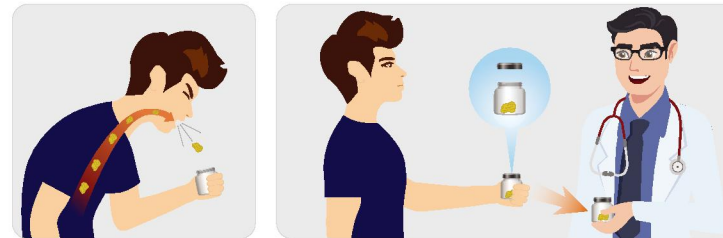

4




Coloque el hisopo en el recipiente que contiene el esputo, gírelo varias veces y empápelolo lo suficiente

## PROCEDIMIENTO DE PRUEBA



1 PASO

Abra el tubo de extracción de solución

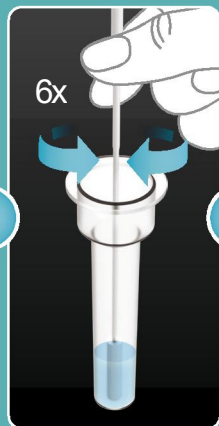


2 PASO

Inserte la muestra del hisopo del paciente en el tubo de solución de extracción. Luego, agite el hisopo al menos 6 veces.



3 PASO

Apriete la cabeza del hisopo contra el interior de el tubo para escurrirlo y retírelo.

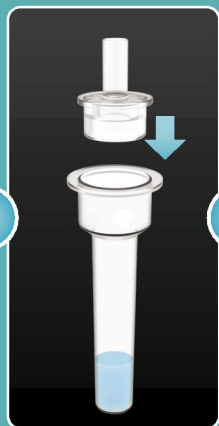

4 PASO


Tape el tubo con la cabeza de obtención de gotas de muestras



5 PASO

Agregue 3 gotas de la solución con espécimen en el pozo de muestra. Espere 10 minutos e intérprete los resultados de la prueba.

## INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

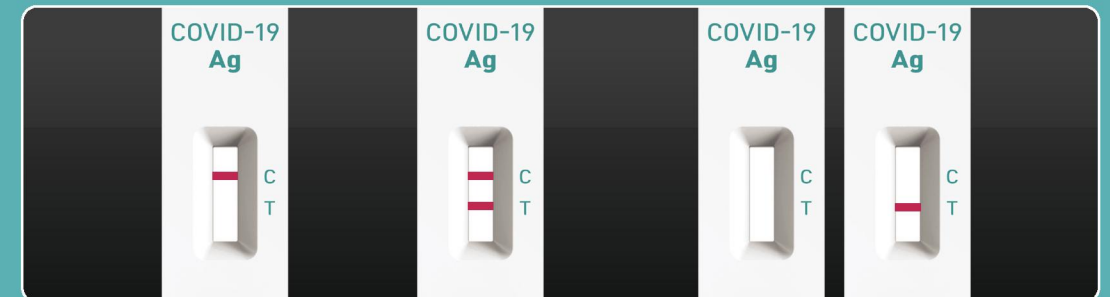

Negativo

Positivo

Inválido



Resultado positivo

Si hay alguna línea borrosa o cambio de color en la línea T en 15 minutos, debe leerse como positivo.